

Gebrauchsanweisung AT51113



Der Rollator AT51113 ist aus hochwertigem und widerstandsfähigem Aluminium hergestellt. Der Klapprahmen erleichtert den Transport. Die Gehilfe ist mit Lenkrädern vorne, starren Bremsrädern hinten und mit einer Feststellbremse ausgestattet. Das Produkt ist zusätzlich mit einem Sitz und einer Lehne ausgerüstet, wodurch sich der Benutzer im Sitzen erholen kann. Der Rollator hat auch eine bequeme Tasche für persönliche Sachen oder kleine Einkäufe.

Warnungen

Vor jedem Gebrauch prüfen Sie den Zustand des Gerätes. Funktioniert oder sieht das Produkt nicht ordnungsmäßig aus, kontaktieren Sie sofort den Verkäufer, bei dem es gekauft wurde. Antar Sp. Jawna haftet nicht für die ordnungswidrige Benutzung des Gerätes.

Zusammensetzung des Produkts

Rahmen	Aluminium
Räder	PVC
Schiebegriffe	Kunststoff
Polsterung der Armlehne	Polyurethan
Sitz	Nylon und Polyester

Vorbereitung zur Benutzung

Die Auswahl der Rollatorart und seine ordnungsmäßige Konfiguration müssen durch medizinisches und technisches Fachpersonal unter Berücksichtigung der Erkrankung und der Bedingungen der Benutzung des Geräts erfolgen.

1. Die Querröhrchen des Sitzes herunterlassen und dann den Rahmen auseinanderfalten.
2. Die Höhe der Schiebegriffe und der Armlehnen regeln.
3. Die Tasche anbringen.
4. Den mittleren Gurt befestigen (Abb. 1), um zufälliges Zusammenfallen des Rollators zu vermeiden. Versichern Sie sich, dass der Gurt gespannt ist.



Benutzung der Bremse

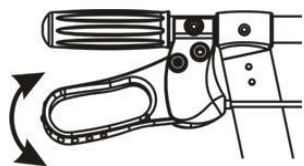


Abb. 1

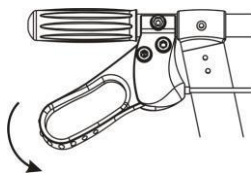


Abb. 2

- Um die Gehilfe zu verlangsamen oder anzuhalten, ziehen Sie den Bremshebel nach oben. Lösen Sie den Bremshebel, um wieder zu gehen (Abb. 1).
- Um die Feststellbremse zu betätigen, drücken Sie den Bremshebel nach unten, bis er gesperrt wird (Abb. 2).

Maximales Benutzergewicht	136 kg
Gesamtbreite	61,5 cm
Breite zwischen den Griffen	50 cm
Gesamttiefe	70 cm
Sitzbreite	46 cm
Sitztiefe	25 cm
Sitzhöhe	54 cm
Einstellungsbereich der Griffhöhe	108,5 – 121 cm
Räder:	8"
Gewicht	8,4 kg

Aufbewahrung und Verwertung

Den Rollator weit von Lichtquellen, hohen Temperaturen und Feuchtigkeit aufbewahren. Direkte Sonnenstrahlung auf den Rollator vermeiden. Den Rollator gemäß den geltenden Umwelt- und Recyclingvorschriften verwerten.

Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen während der Benutzung

Vor der Benutzung vergewissern Sie sich immer, dass die Schiebegriffe entsprechend hoch und gut befestigt sind. Um ein Umfallrisiko zu vermeiden, benutzen Sie den Rollator nicht auf ungeraden oder schrägen Flächen. Prüfen Sie den Zustand der Räder und Bremsen. Endgültig prüfen Sie die allgemeine Stabilität des Rahmens.

Wartung und Reinigung

Nach jedem Gebrauch soll der Schmutz mit milden Reinigungsmitteln beseitigt und den Rollator zum Abtrocknen stehen gelassen werden. Keine scharfen und reibenden Schwämme nutzen. Die Bremsen, Dichtungen der Befestigungsteile und der Zustand der Schweißnaht sollen regelmäßig geprüft werden.

GARANTIESCHEIN

Modell:
 SN:

Stempel und

lesbare Unterschrift des Verkäufers

1) AN TAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawiślńska 43, erteilt hiermit 12-monatige Garantie für den Rollator ab dem Tag des Erwerbs des Produkts durch den Käufer. Für Produkte, deren Kauf der Polnische Gesundheitsfonds erstattet, wird die Garantiefrist verlängert und beträgt die Hälfte der in der Verordnung über die garantierte Leistungen genannte Nutzungsdauer, jedoch unter der Bedingung, dass die Nutzungsdauer in der Verordnung in Monaten oder Jahren angegeben wurde.

2) AN TAR verpflichtet sich, alle Reparaturen, die zur Wiedererreichung der ordnungsmäßigen Funktionierung des Produktes erforderlich sind, in der Garantiefrist binnen 14 Tagen nach Erhalt des Produkts mit Kaufbeleg und Garantieschein durch den Service durchzuführen.

3) AN TAR behält sich das Recht vor, das Produkt auszutauschen, wenn sie feststellt, dass die Reparaturkosten zu hoch sind. Die Reparatur bzw. der Austausch der mangelhaften Produkte hat keine Verlängerung der Garantiefrist zu Folge.

4) Wird es festgestellt, dass das Produkt nicht richtig funktioniert, soll es unverzüglich an AN TAR (Anschri ft gemäß Punkt 1) versendet werden oder es soll der Verkäufer kontaktiert werden.

5) Vor der ersten Benutzung lesen Sie die Gebrauchsanweisung genau durch und beachten Sie diese. Die Garantie erlischt unwiderruflich im Fall einer bestimmungswidrigen und empfehlungswidrigen Benutzung des Produkts.

6) Die Garantie deckt keine Beschädigungen durch Einwirkung einer äußeren mechanischen Kraft, Überlastung entgegen der Gebrauchsanweisung und durch den Kontakt des Produkts mit Alkohol, Fett oder Benzin. Die Garantie betrifft nicht die Verschleißteile, wie Lager, Gummiteile und andere.

7) Das an den Service im Rahmen der Reklamation übergebene Produkt darf keine Seuche verursachen.

8) DIESE GARANTIE GILT AUSSCHLIESSLICH MIT DEM KAUFBELEG (RECHNUNG, KASSENZETTEL). BEI REKLAMATION FÜGEN SIE BITTE DEN KAUFBELEG BEI. UM DIE VERLÄNGERTE

GARANTIE FÜR DIE DURCH DEN POLNISCHEN NATIONALFONDS ERSTATTETEN PRODUKTE ZU ERHALTEN, FÜGEN SIE EINE KOPIE DES AUFTRAGS AUF VERSORGUNG MIT MEDIZINISCHEN PRODUKTEN, WIE ORTHOPÄDISCHE PRODUKTE UND HILFSMITTEL, BEI.

9) Reklamationen, die ohne Kaufbeleg und Garantieschein mit der Seriennummer des Produkts angemeldet werden, werden nicht beachtet.



AN TAR Sp. J.
 03-068 Warszawa
 ul. Zawiślńska 43
 Polen
 Tel.: +48 22 518 36 00
 Fax: +48 22 518 36 30
 www.antar.net

